

C Fitting / Colocación


C-1



Side strap is vertical / La correa lateral es vertical

Lower strap sits below ear / La correa inferior se apoya detrás de la oreja


C-2

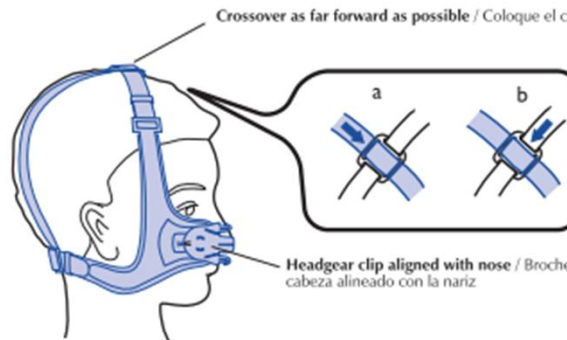


Crossover as far forward as possible / Coloque el cruce lo más hacia delante posible

Headgear clip aligned with nose / Broche del amés para la cabeza alineado con la nariz

C-3

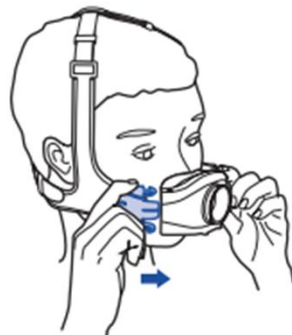


C-4

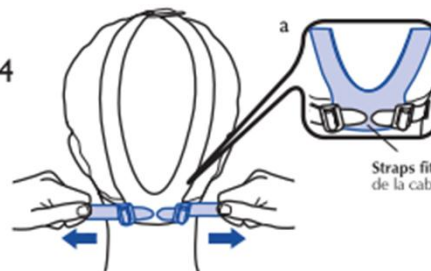


Straps fit securely at base of head / Las correas se ajustan en la base de la cabeza

C-5

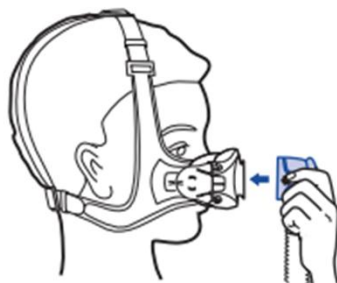

C-6

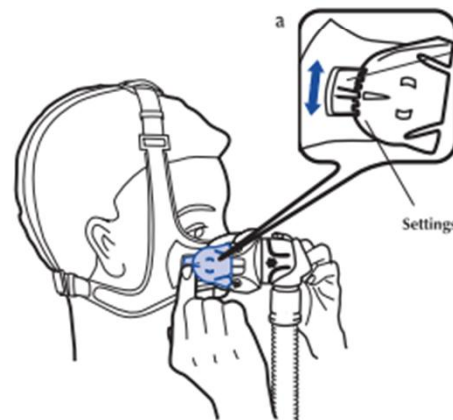

Angle Selector Tab / Lengüeta selectora de ángulo

Settings / Posiciones